

Brugsanvisning

Baggrund og indikationer:

Symptomer på tør mund og problemer med at synke er bla. udtalte hos patienter der tidligere er strålebehandlet for kræft i hoved og halsområdet. Dette kan skyldes nedsat eller manglende spytproduktion og/eller immobilitet i selve synkemuskulaturen efter strålebehandlingen, hvilket har påvirket synkefunktionen. For disse patienter kan indtagelse af faste fødevarer være meget besværligt og forbundet med væsentligt ubehag og smerter.

Beskrivelse og tilsigtet brug

Salient mundgel er en nyudviklet gel, opfundet af forskere ved Københavns Universitet. Salient er en smagsneutral, spiselig gel, som gennem sit design har opnået særlige egenskaber. Gelen har blandt andet god 'trådtrækningssevne' og vedhæfter godt til tørre slimhinder.

Benyt gelen umiddelbart inden fødeindtagelse. Gelen giver øget smøring og reduktion af friktionen i spiserør, svælg og mund, og kan dermed medvirke til at reducere ubehag ved fødeindtagelse for patienter med manglende eller nedsat spytproduktion.

Sådan bruger du Salient mundgel i 50ml doserings-emballage

1. Tag hættten af og skru pumpemundingen $\frac{1}{4}$ omgang mod uret for at låse den op. Hvis flasken er helt ny, skal du pumpe et par gange for at fjerne luft. Pumpen er nu klar til brug.

2. Anvend en plastic ske el lign., hvorpå du doserer gel med 2 tryk (svarende til ca 3 ml), hvorefter du indfører gelen bagest i munden.



Alternativ metode; Åbn munden og læn hovedet lidt bagover, vend munden på pumpen ind mod svælg og tryk pumpen ned 2 gange, svarende til en dosis.



3. Fordel gelen med tungen om nødvendigt, og synk let for at få gel i svælg. Undgå at skylle efter med vand.

4. Skru pumpehovedet $\frac{1}{4}$ omgang med uret for at låse pumpen og tør eventuelle gelrester væk fra pumpehovedet med en serviet, før hættten sættes tilbage på plads. Opbevar gerne gelen i køleskabet, så holder den bedst sine egenskaber.

5. Nyd dit måltid eller anden form for aktivitet.

Andre forholdsregler

- Vær opmærksom på at Salientgel skaber en glat hinde i mund og svælg, der påvirker synkemekanismen, hvilket kan føre til fejlsynkninger. Det anbefales at du forsøger dig med små bidder mad til at starte med, indtil du kender effekten.

- Salientgel bør opbevares på køl, men kan opbevares ved stuetemperatur i kortere perioder. Må ikke udsættes for temperaturer over 30 grader da det kan påvirke gelens gode egenskaber.

- Skal anvendes før sidste dag i udløbsmåneden.

- Når flasken er tom, kan den bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Husk at genbestille.

- Brug ikke Salient mundgel, hvis du er overfølsom/ allergisk over for et af indholdsstofferne, som, udover vand (> 95%), udgør; polyethylenoxid, hydroxypropyl-methylcellulose, butylhydroxytoluen, kaliumsorbat, æblesyre.

- Salientgel må ikke anvendes af børn under 18 år eller af gravide.

Producent & andre oplysninger

Salient gel er udviklet og produceret i Danmark, i overensstemmelse med EU's krav til medicinsk udstyr, klasse I

Salient Pharma ApS

Naverland 22
DK-2600 Glostrup
Phone +45 4280 6300
contact@salientpharma.com
salientpharma.com

Gyldig fra: 01/2019

